



Pasta Konduktif Ten20®

[ID]

REF 10-20-1, 10-20-1K, 10-20-1S

Bahan: Polioksietilena 20 Setil Eter, Air, Gliserin, Kalsium Karbonat, 1,2-Propanediol, Kalium Klorida, Montmorilonit, Natrium Klorida, Polioksietilena 20 Sorbitol, Metilparaben, Propilparaben.

Indikasi Penggunaan: Untuk digunakan dalam prosedur pemantauan saraf bersama elektrode neurodiagnostik tanpa gel, misalnya: pemeriksaan EEG, prosedur potensial rangsang, PSG, dan MSLT.

Penerapan: Kualitas perekatan Pasta Konduktif Ten20 biasanya cukup untuk merekatkan elektrode ke kulit dan menyediakan konduktivitas untuk pemeriksaan neurodiagnostik. Pertama, lakukan abrasi lembut pada kulit dengan produk abrasif seperti Nuprep®. Dengan menggunakan elektrode mangkuk berbentuk lonceng yang berlubang di tengah, celupkan elektrode ke dalam wadah Ten20 dan ciduk pasta sampai mangkuk elektrode meluap sedikit. Tempelkan elektrode di lokasi elektrode yang sudah disiapkan, lalu tekan dengan tekanan sedang. Gunakan plester atau perban untuk menahan elektrode di tempat.



Jangan sampai terkena mata. Jika produk mengenai mata, bilas dengan air hangat selama 10-15 menit. Jangan mengucek mata. • **Gunakan secara topikal hanya pada kulit utuh.** Jangan gunakan pada atau di dekat luka terbuka atau kulit yang terkompromi. • **Harap lebih berhati-hati jika pasien memiliki riwayat alergi kulit atau sensitif terhadap kosmetik dan losion.** Jika muncul ruam, kemerahan, gatal, bengkak, atau abnormalitas pada kulit, segera cuci bersih. • **Toleransi pasien terhadap produk topikal sangat berbeda-beda.** Ada pasien yang tidak terlalu toleran terhadap perekat, abrasif, medium konduktif, dan garam-garaman. Tanggapi keluhan apa pun yang mungkin menandakan bahwa pasien tidak toleran terhadap produk. • **Minta pasien memberi tahu jika ada kemerahan, nyeri, atau bengkak terus-menerus di lokasi elektrode.** Infeksi topikal dapat menimbulkan bekas luka permanen jika tidak diobati. • **Lokasi elektrode jangka panjang harus diperiksa setidaknya sehari sekali kalau-kalau ada iritasi atau kemerahan, dengan cara melepaskan elektrode dan mengevaluasi kondisi kulit di bawah elektrode.** • **Jangan digunakan bersama elektrode yang menimbulkan arus listrik.**

Laporkan insiden serius yang terjadi sehubungan dengan perangkat ini kepada produsen dan, jika di UE, kepada pihak berwenang yang kompeten di Negara Anggota tempat pengguna dan/atau pasien berada.

Keamanan dan Penanganan: Ten20 tidak beracun jika tertelan. Ten20 diproduksi tanpa menggunakan lateks karet alam. Simpan wadah pada suhu kamar. Hindari suhu dingin atau pembekuan berkepanjangan. Wadah dirancang untuk **SEKALI PAKAI SAJA**. Setelah dibuka, pasta harus digunakan pada satu pasien saja, lalu dibuang. Ten20 dapat dibuang tanpa penanganan khusus.



Weaver and Company
565 Nucla Way, Aurora, CO 80011, USA
+1-800-525-2130 www.weaverandcompany.com

