



# Nuprep® Skin Prep Gel

[SK]

**REF** 10-30, 10-30K, 10-61, 10-65, 10-25, 10-25S

**Zloženie:** voda, oxid hlinitý, 1,2-propándiol, polyakrylát sodný, metylparabén, propylparabén, FD&C modrá 1, FD&C červeň 40, FD&C žltá 5.

**Indikácie na použitie:** Na použitie v prípadoch, keď by nižšia impedancia pokožky zlepšila výsledky, napr.: vyšetrenia EEG, zákroky s evokovaným potenciálom, záťažové EKG testy, monitorovania srdcovej rehabilitácie a vyšetrenia pri monitorovaní srdcových katétrov.

**Použitie:** Dostatočné množstvo gélu vytlačte na podložku, ako napríklad gázu. **V prípade opakovane použiteľných elektród** jemne potrite pokožku bavlneným tampónom s malým množstvom prípravku Nuprep a potom ho 4 až 5 malými kruhovými pohybmi zľahka votrite do pokožky; utrite nadbytočný gél a potom na pripravené miesta aplikujte elektródy. **V prípade srdcových elektród** vytlačte malé množstvo prípravku Nuprep na gázu a 4 až 5 malými kruhovými pohybmi ho zľahka votrite do pokožky; pred aplikovaním elektród utrite z miest na upevnenie elektród všetok prípravok Nuprep pomocou suchej gázy. Pri novorodencoch a geriatrických pacientoch aplikujte oveľa menší tlak ako pri dospelých pacientoch.



**Vyhňte sa kontaktu s očami. Ak sa prípravok dostane do oka, oplachujte ho vodou 10 až 15 minút. Oči si netrite.** • **Používajte lokálne len na neporušenej pokožke.** Nepoužívajte na alebo v blízkosti otvorených rán alebo poškodenej pokožky. • **U pacientov s predchádzajúcimi kožnými alergiami alebo citlivosťou na kozmetiku a telové mlieka postupujte mimoriadne opatrne.** Ak sa na pokožke objavia vyrážky, začervenanie, svrbenie, opuch alebo iný abnormálny jav, prípravok okamžite umyte. • **Nepoužívajte s elektródami indukujúcimi prúd.** • **Nevtierajte veľké množstvo prípravku;** môže dôjsť k lokálnemu odretiu s permanentným zjazvením.. • **Gél Nuprep obsahuje nerozpustné látky, ktoré môžu spôsobiť tieň alebo rušenie počas vyšetrenia magnetickou rezonanciou (MR).** Pred MR vyšetrením skontrolujte, či sa na miestach na elektródy nenachádzajú žiadne látky používané pri neurologickom diagnostickom vyšetrení.

**Každý závažný incident, ku ktorému dôjde v súvislosti s pomôckou, nahláste výrobcovi a v prípade krajín EÚ aj kompetentnému orgánu členského štátu, v ktorom má používateľ/pacient bydlisko.**

**Bezpečnosť a manipulácie:** prípravok Nuprep je v prípade náhodného požitia netoxický. Prípravok Nuprep sa vyrába bez použitia prírodného latexu. Ak prípravok nepoužívate, uchovávajte nádoby pevne zatvorené. Nie sú potrebné žiadne špeciálne skladovacie podmienky. Prípravok Nuprep sa môže zneškodniť bez potreby špeciálnej manipulácie.



Zdravotnícka pomôcka



Dovozca



Distribútor



Weaver and Company, 565 Nucla Way, Aurora, CO 80011, USA  
+1-800-525-2130 www.weaverandcompany.com

